



メジャリングプリズムの使用期間について

いつもハグストリート社の「ゴールドマン アプリケーション/メタ用メジャリングプリズム」をご愛用頂き誠に有難うございます。この度ハグストリート社は、メジャリングプリズムを安全にご使用頂ける有効期限（製造日より5年間）を設け、且つ使用期間は最長2年に留めるようにと強調してまいりました。ご使用になる消毒液の種類や濃度・患者数・取扱方法など様々な要素があるため、使用回数または安全に使用できる期間を一概に定めることはできませんが、同社は多数の施設での実績を精査した結果、この期間を推奨しております。

ハグストリート社はこれを徹底するため、メジャリングプリズム本体の表示を変更しますのでご案内致します。

- 2010年12月以前に販売されていたメジャリングプリズムには、**製造日（工場のマーク  の後に西暦年-月）**が印字されています。**有効期限はこの日より5年間**です。
- 現在販売中のメジャリングプリズムには、**有効期限（砂時計のマーク  の後に西暦年-月）**が印字されています。
- 2009年10月以前に製造されたメジャリングプリズムにはロット番号のみが印字されています。
詳細についてはお問い合わせ下さい。


2010年12月以前に販売



現在販売中



- 有効期限を過ぎたら使用しないで下さい。ハグストリート社は**有効期限までの最長2年間の使用を推奨**しています。
- 使用期間は、最初に使用した時から始まります。
- 使用期間は、取扱説明書に記載されている指示に従って正しく使用されている場合に適用されます。「ゴールドマン アプリケーション/メタ用メジャリングプリズムの取扱いについて」を参照して下さい。
- 使用期間は、キズもしくはクラックのついたメジャリングプリズムには適用されません。キズもしくはクラックのついたものは直ちに廃棄して下さい。廃棄の際は、医療廃棄物として各自治体の指示に従い適正に処理して下さい。

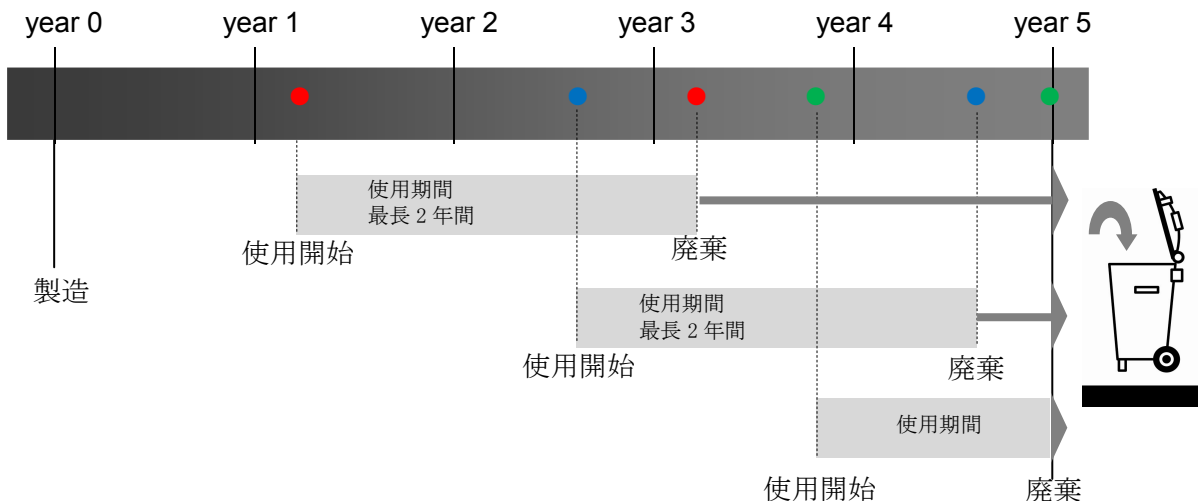

使用期間が2年に満たなくても、有効期限が過ぎたら廃棄



® (株) JFCセールスプラン 営業部
本社 / Tel.03-5684-8531 大阪 / Tel.06-6271-3341
名古屋 / Tel.052-261-1931
福岡 / Tel.092-414-7360

ジャパンフォーカス(株) JFCテクノクラート
本社 / Tel.03-3815-1995 大阪 / Tel.06-6262-1099